

LƯU Ý SỬ DỤNG

HỘP HÚT ẨM ĐIỆN

- + Nguồn điện cung cấp nguồn ra 5V, 1A (công suất 5W, 100-220v).
- + Phải lau thiết bị trợ thính và lấy pin ra ngoài trước khi sấy.
- + Không sấy máy quá 12 giờ/ngày.
- + Đối với các thiết bị trợ thính bị chảy pin, sét, nên vệ sinh sạch trước khi sấy.
- + Không mở nắp hộp hút ẩm khi đang sấy.
- + Ngắt điện sau khi sử dụng.
- + Không tự ý sửa chữa, tháo lắp.
- + Để xa tầm tay trẻ em.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÚT ẨM

ĐIỆN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HỘP HÚT ẤM ĐIỆN

Máy hút ẩm điện cho thiết bị trợ thính sử dụng chip nhiệt với công nghệ kiểm soát nhiệt độ tự động. Máy có nhiệt độ phù hợp không đổi trong thời gian cài đặt đem lại hiệu quả hút ẩm cao. Máy có tấm chặn cách nhiệt, giúp tránh nhiệt độ cao tác động trực tiếp lên thiết bị trợ thính.

Đối với người già và trẻ em, sức đề kháng sẽ kém hơn, thiết bị trợ thính bám dính mồ hôi và ráy tai trong quá trình sử dụng dễ sinh vi khuẩn, vi rút gây ảnh hưởng sức khỏe.

Tùy vào dòng máy, máy có thể có thêm tính năng: cài đặt thời gian, cài đặt nhiệt độ sưởi, đèn UV tạo ra tia cực tím 275nm khử khuẩn, hay kiểm tra công suất pin.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỘP HÚT ẤM ĐIỆN

CÁCH SỬ DỤNG

HỘP HÚT ẤM ĐIỆN

Bước 1: Gắn cáp USB vào đầu cắm adapter hoặc thiết bị điện tương đương. Đầu cắm còn lại gắn vào hút ẩm điện.

Bước 2: Lấy pin ra khỏi thiết bị trợ thính. Lau sạch mồ hôi và ráy tai (nếu có) trên bề mặt thiết bị trợ thính. Mở cửa pin và đặt thiết bị trợ thính vào trong hộp hút ẩm, đóng nắp hộp hút ẩm lại.

Bước 3: Khi cắm điện, máy hút ẩm sáng đèn xuyên suốt trong quá trình sấy máy.

- * Trong các dòng máy có đèn UV khử khuẩn, đèn UV đồng thời cũng được bật lên, sau 30 phút sẽ tự tắt khi quá trình diệt khuẩn hoàn thành.

- * Trong các dòng máy có cài đặt thời gian, nhấn nút Time (thời gian) để điều chỉnh thời gian.

- * Trong các dòng máy có cài đặt nhiệt độ, nhấn nút Temp (nhiệt độ) để chọn nhiệt độ.

- * Khuyến khích sử dụng mức nhiệt độ cao hơn trong mùa đông và thời gian lâu hơn trong mùa mưa.

Bước 4: Khi quá trình sấy hoàn tất, máy sẽ tự chuyển sang chế độ làm mát. Ngắt điện máy sau khi hoàn tất, lấy thiết bị trợ thính ra và sử dụng bình thường.