

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ THANH QUẢN ĐIỆN TỬ



  
**ROMET®**  
MODEL **R310**

## VẬN HÀNH MÁY

Sử dụng dễ dàng bằng một tay để điều khiển giọng nói của bạn.  
**KHÔNG CẦN DỤNG CỤ**

## ĐIỀU CHỈNH CAO ĐỘ

Xoay bánh xe để chỉnh cao độ cao hoặc thấp. Không cần điều chỉnh gì khác khi bạn đạt được cao độ mong muốn.

## NÚT TẮT/MỞ

Nhấn nút để nói và buông ra khi đã nói xong.

## ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

Xoay bánh xe để chỉnh âm lượng giọng nói.  
Dấu + hay – biểu hiện âm lượng lớn hay nhỏ hơn.



## THỰC HÀNH

Đặt máy ROMET ELECTRONIC LARYNX vào vùng cổ và cố gắng tìm “điểm lý tưởng” để có được giọng phát âm chuẩn

**LƯU Ý:** điểm lý tưởng đặt máy có thể nhiều nơi trên vùng cổ hoặc cạnh miệng; mỗi người sẽ có điểm lý tưởng khác nhau phụ thuộc vào cấu trúc da và độ rung mà ta nhận được. Nhìn vào gương và lặp lại một câu đơn giản để đạt được độ phát âm rõ ràng nhất. Nếu có thể, hãy thu âm giọng nói của bạn và nghe lại để biết được bản thân phát âm như thế nào.

**Hãy luyện tập thường xuyên!**



## SẠC PIN

Hai viên pin 9V Lithium-Ion được đi kèm theo với mẫu máy R310. Ban đầu hai viên pin sẽ đầy 80%.

Sạc đầy pin trước khi sử dụng để đạt công suất tối đa.

Cắm sạc Lithium vào nguồn 110V (ở từng địa phương dùng nguồn 220V sẽ phải cần adapter – được đi kèm theo bộ máy).

Gắn 1 hoặc 2 viên pin vào sạc.

Đèn led màu ĐỎ = Đang sạc

Đèn led màu XANH = Sạc đầy

## LẮP PIN

Mở cửa pin ở cuối thân máy và lắp pin 9V vào máy. Pin sẽ có màu và kí hiệu cực pin giúp cho người dùng đặt đúng chiều. Khi cửa pin được cài chắc chắn vào máy, dòng điện được hình thành và máy sẵn sàng được sử dụng.



## CẢNH BÁO

Pin sạc Li-Ion chỉ được dùng duy nhất với thiết bị sạc Li-Ion. KHÔNG cố gắng sử dụng với bất kỳ thiết bị sạc nào khác. Pin kiềm 9V có thể sử dụng được với thanh quản điện tử Romet.

Manufactured & Distributed Worldwide by:

**Fountain Head Marketing, Inc.**

Dba: Romet Electronic Larynx

14410 Saratoga Pass

San Antonio, TX 78254-1860

USA

Phone : 1.210.858.5189

Fax : 1.210.858.9608

Email : [info@romet.us](mailto:info@romet.us)

Web : <http://www.romet.us>

SRN : US-MF-000009241



**European Union Representative**

EuropeanCer Alstr.97

41063 Mönchegladbach, Germany

SRN: DE-AR-000004974



Registration: 3007615474

Listing: D199809