

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ THANH QUẢN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT SỐ




ROMET®
MODEL **R600**



Romet Genesis là gì?

Romet Genesis là thiết bị thanh quản điện tử được thiết kế và sản xuất sử dụng công nghệ kỹ thuật số tối tân nhất để hỗ trợ người bị cắt thanh quản có thể giao tiếp.


Tất cả công nghệ vận hành thanh quản điện tử được sản xuất bởi Fountain Head Marketing Inc. tại San Antonio, Texas, USA.

Thanh quản điện tử kỹ thuật số tạo ra rung động cơ học với tần số âm thanh thấp trong khoảng 60 -195Hz. Đầu trên của thiết bị được ép vào cổ hoặc một bên của khuôn mặt, những rung động này tạo ra rung động trong khoang miệng mô phỏng lại giọng nói của con người. Sự kết hợp giữa bắt đầu và dừng rung động âm thanh và phát âm bằng miệng với việc sử dụng lưỡi tạo ra giọng nói con người có thể hiểu được.

SỬ DỤNG CƠ BẢN

Pin của thiết bị đã được nhà sản xuất sạc trước một phần. Để bắt đầu nói, bật công tắc ở phía dưới cùng của thiết bị, trượt công tắc từ OFF sang ON. Nếu đèn sáng **XANH LÁ**, pin đã được sạc đầy. Nếu đèn sáng **ĐỎ**, **báo hiệu pin yếu** và nên sạc càng sớm càng tốt.

Sau khi nhấn nút vận hành, ta có thể bắt đầu nói chuyện theo sự hướng dẫn dưới đây. Dòng máy Digital Genesis là dòng tối giản. Người sử dụng không thể điều chỉnh âm lượng hay cao độ. Nếu bạn muốn sử dụng thanh quản điện tử có nút điều chỉnh cao độ/âm lượng, bạn nên dùng dòng máy R700 Clarity được trang bị nhiều tính năng.

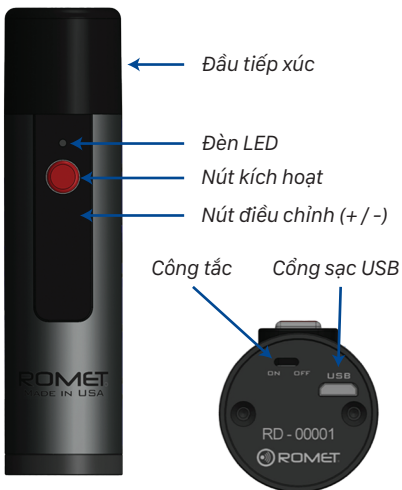

TÌM “ĐIỂM LÝ TƯỞNG”

“Điểm lý tưởng” là vùng ta cảm nhận được độ rung của thanh quản điện tử truyền qua biểu bì vùng cổ vào trong khoang miệng rõ ràng nhất. Cách dễ nhất để tìm “điểm lý tưởng” là đề chặt thanh quản điện tử lên vùng cổ ở nhiều vị trí khác nhau, cử động miệng và lưỡi để phát ra âm thanh của từ ta muốn nói. Bạn nên tìm vị trí trên cổ dẫn truyền âm thanh tốt nhất. Khi tìm “điểm lý tưởng”, mục đích để chuyển đổi âm thanh từ biểu bì cổ và ra khỏi khoang miệng. Hãy dành thời gian để tìm “điểm lý tưởng” của bạn. Đây là phần quan trọng để học cách sử dụng thanh quản điện tử. Tìm được đúng chỗ sẽ giúp bạn thành công. “Điểm lý tưởng” của từng người sẽ nằm ở vị trí khác nhau do mức độ phẫu thuật và xạ trị.

NHỮNG TỪ ĐẦU TIÊN

Sau khi bạn đã xác định được điểm lý tưởng, bạn có thể bắt đầu tạo ra một số âm thanh cơ bản. Tập trung vào các nguyên âm đơn trước. Nói rõ mọi âm thanh bằng miệng cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với tất cả các nguyên âm. Sau đó, bạn có thể bắt đầu luyện tập các từ ngắn, sau đó là câu và đến giao tiếp.

KỶ VỌNG

Học cách nói bằng thanh quản điện tử không phải điều dễ dàng. Giống như chơi một nhạc cụ, sẽ cần thời gian, luyện tập và sự kiên nhẫn. Trong vài trường hợp, việc giao tiếp có thể thành thạo trong một tháng, một vài trường hợp chỉ mất ba ngày.

PIN

Kiểm tra mức pin khi thiết bị được bật lần đầu. Nếu pin được sạc đầy, đèn LED sẽ sáng XANH LÁ. Nếu pin yếu, đèn sẽ sáng ĐỎ. Trong lúc nói, đèn LED sẽ sáng màu phụ thuộc vào mức pin đang có trong máy. Khi cắm sạc, đèn LED ĐỎ phía trên nút điều chỉnh sẽ từ từ sáng lên rồi từ từ mờ cho đến khi tắt hoàn toàn. Khi đầy pin, đèn sẽ sáng XANH LÁ và không chớp nữa. Thiết bị sẽ được sạc đủ cho đang ở chế độ bật hay tắt. Lưu ý: thiết bị sẽ không hoạt động khi đang sạc. Đây là chế độ an toàn để bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng.

SẠC THIẾT BỊ

Cần sạc thiết bị khi ấn nút vận hành mà đèn LED hiện màu đỏ (nghĩa là mức pin đang dưới 100%). Khi nhấn nút vận hành hoặc khi vừa khởi động thiết bị và xuất hiện đèn LED đỏ, pin cần được sạc trước những khi cần thời gian trò chuyện dài. Việc sạc pin được thực hiện bằng bộ sạc được cung cấp theo hộp. Cắm dây cáp micro USB vào cổng micro USB ở dưới thiết bị, sau đó cắm đầu còn lại trực tiếp vào ổ cắm điện tường. Hãy cẩn thận khi cắm dây micro USB để sạc. Đừng cố dùng lực đè mạnh đầu micro USB vào khe cắm. Khi đang sạc, đèn LED ĐỎ trên bảng nút sẽ từ từ sáng lên đến độ sáng đầy đủ rồi từ từ mờ cho đến khi tắt hoàn toàn. Khi thiết bị được sạc đầy, đèn LED trên bảng nút sẽ chuyển sang XANH LÁ và không chớp.

LƯU Ý:

Thiết bị sẽ không hoạt động khi đang sạc. Đây là một biện pháp an toàn bảo vệ thiết bị khỏi bất kỳ hư hỏng nào về điện. Thiết bị sẽ được sạc đủ cho đang ở chế độ bật hay tắt.

HỘP PHỤ KIỆN:

- * Thiết bị thanh quản điện tử Romet Genesis
- * Cáp sạc USB
- * Sạc quốc tế USB 5V 2A
- * Dây đeo an toàn Romet
- * Bảng hướng dẫn sử dụng Romet Genesis
- * Thẻ bảo hành 2 năm từ ngày mua của Romet Genesis



"Tất cả những gì bạn cần là sử dụng thiết bị và bắt đầu nói"



www.romet.us

Manufactured & Distributed Worldwide by:

Fountain Head Marketing, Inc.

DbA: Romet Electronic Larynx

14410 Saratoga Pass

San Antonio, TX 78254-1860

USA

Phone : 1.210.858.5189

Fax : 1.210.858.9608

Email : info@romet.us

Web : <http://www.romet.us>

SRN : US-MF-000009241



European Union Representative

EuropeanCer Alsstr.97

41063 Mönchegladbach, Germany

SRN: DE-AR-000004974



Registration: 3007615474

Listing: D199809